













## KOMENTÁŘ K INSTRUKTÁŽNÍMU VIDEOU

Komentář	Na obrazovce
<p>Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali pomůcku pro kontrolu kontinence VITALA™ – nový převratný bezsáčkový systém, který vrací lidem žijícím s kolostomií kontrolu nad vyprazdňováním.</p>	
<p>Díky svému unikátnímu patentovanému designu nabízí tato stomická pomůcka novou úroveň spolehlivosti při zajištění kontinence.</p>	
<p>VITALA<sup>®</sup>, pomůcka pro kontrolu kontinence, je konstruována pro použití s podložkami NATURA<sup>®</sup>. Přečtěte si, prosím, návod k použití podložek NATURA<sup>®</sup> a informace o tomto výrobku. Při použití pomůcky VITALA<sup>®</sup> se doba nošení podložky může měnit.</p>	
<p>Před použitím pomůcky VITALA<sup>®</sup> nejdříve aplikujte podložku obvyklým způsobem tak, že otvor v ní umístíte na střed stomie a přitisknete na kůži.</p>	
<p>Uhladte vnitřní povrch adheziva uvnitř přírubového kroužku kolem stomie. Mírným tlakem prstů po obvodu stomie tiskněte podložku na kůži po dobu asi 30 sekund.</p>	
<p>Přečtěte si, prosím, přiložený návod k použití pomůcky VITALA<sup>®</sup>.</p> <p>Stiskněte oběma palci spodní část deflačního krytu pomůcky a postupujte směrem vzhůru, abyste vytlačili vzduch ze vzduchového těsnění a to zcela splasklo.</p>	
<p>Oddělte pomůcku VITALA<sup>®</sup> od deflačního krytu. V průběhu aplikace, která trvá přibližně minutu, by mělo vzduchové těsnění zůstat zcela splasklé.</p>	

Komentář	Na obrazovce
<p>Pomůcka je dodávána již otevřená, jak znázorňuje obrázek, a proto dbejte na to, abyste modrý spojovací kroužek nezacvakli a tím pomůcku neuzavřeli.</p>	
<p>Pokud je modrý spojovací kroužek v uzavřené poloze, jak vidíte na obrázku, zlikvidujte pomůcku a použijte novou.</p>	
<p>Pomůcku přiložte spojovacím kroužkem na kroužek podložky tak, aby jazýček směřoval k Vaším nohám.</p>	
<p>Existují dva doporučené způsoby, jak pomůcku spolehlivě připevnit k podložce. První způsob – metoda konečků prstů – spočívá v tom, že koncečky natažených prstů přitlačíte vnější kroužek postupně po celém jeho obvodu k podložce shora i zdola a ujistíte se, že pomůcka je spolehlivě připevněna.</p>	
<p>Druhý způsob připevnění je oběma rukama zároveň, jak vidíte na obrázku. Položte dlaň jedné ruky na stomickou pomůcku a druhou dlaň položte na ruku držící pomůcku a poté oběma rukama zároveň pomůcku přitlačte k podložce.</p>	
<p>Pomůcka VITALA<sup>®</sup> musí být, jak je znázorněno, po celém obvodu dobře připevněna k podložce.</p>	
<p>Jestliže jsou někde vidět připojovací zoubky modrého kroužku, přitiskněte vnější kroužek v této oblasti na podložku a ujistíte se, že je spolehlivě připevněn. Malé ruční zrcátko Vám pomůže zkontrolovat, zda je pomůcka dobře připevněna po celém obvodu.</p>	
<p>Jakmile je pomůcka připojena, samonadouvací vzduchové těsnění spolehlivě utěsní stomii.</p>	

Komentář	Na obrazovce
<p>Měkká pěna, uzavřená ve vzduchovém těsnění, se nafoukne a vytvoří vhodný tlak na stomii, čímž ji utěsní.</p>	
<p>Pomůcka VITALA® zabrání úniku stolice ze stomie, avšak nijak nebrání úniku plynů, které deodorizuje.</p>	
<p>Šipky naznačují průtok plynu okolo vzduchového těsnění skrze speciální filtr, který odstraňuje zápach. Plyn pak uniká ven větracími otvory v krytu pomůcky.</p>	
<p>Při odstraňování pomůcky ji stiskněte uprostřed a přidržujte pevně k podložce jednou rukou.</p>	
<p>Druhou rukou pak nadzdvihněte jazýček a odtahujte jej od těla až praskne a oddělí se od podložky.</p>	
<p>Uvolněte vnější kroužek. Nechte roztažitelný kontejner samovolně rozvinout. Neotevírejte jej násilím.</p>	
<p>Ponechte roztažitelný kontejner otevřený několik minut, aby mohl připadnou stolicí zachytit.</p>	
<p>Přidržujte podložku jednou rukou a jemně sloupněte pomůcku VITALA® z podložky zatažením za ovládací jazýček spojovacího kroužku.</p>	

Komentář	Na obrazovce
Zatáhnutím za modrý kroužek směrem dolů odstraňte stomickou pomůcku z podložky.	
Pokud celková doba nošení za den nepřekročila 8 hodin, můžete aplikovat další pomůcku VITALA <sup>®</sup> .	
Pokud neaplikujete pomůcku VITALA <sup>®</sup> , nasadte na podložku sáček NATURA <sup>®</sup> .	

Přečtěte si, prosím, přiložený Návod k použití pomůcky VITALA<sup>®</sup>.

Více informací získáte na adrese: **www.convatec.cz** nebo na **StomaLinka<sup>®</sup> 800 122 111**.

VITALA<sup>®</sup> a NATURA<sup>®</sup> jsou registrované obchodní značky společnosti ConvaTec.

©2010 ConvaTec